

## DATENBLATT

### Syphilis Schnelltest

Art.-Nr.: C3 0610-05



Der Schnelltest Syphilis der Marke Cleartest ist ein zielgerichteter Antikörpertest, der sich über die Jahre fest auf dem Markt etabliert hat. Der Syphilis Schnelltest kann in wenigen Minuten durchgeführt werden und liefert innerhalb von fünf Minuten zuverlässige Ergebnisse und dient zur Unterstützung der Diagnose Syphilis. Der Lues Schnelltest der Marke Cleartest dient zum qualitativen Nachweis von Treponema Pallidum(TP) Antikörpern im Plasma, Serum oder Vollblut. Der Cleartest Syphilis dient als Hilfsmittel zur Feststellung der Diagnose Syphilis.

## Anleitung und Anwendung Syphilis-Schnelltest

Der Schnelltest Syphilis kann anhand von Vollblut, aus der Venenpunktion oder der Fingerbeere durchgeführt werden. Der Lues Test kann aber auch mit Serum oder Plasma angewendet werden.

Für ein optimales Testergebnis sollten die Hände mit warmen Wasser und Seife gewaschen werden,

alternativ können Sie auch einen Alkoholtupfer einsetzen. Um eine Blutprobe zu entnehmen punktieren Sie den gewünschten Bereich mit einer sterilen Lanzette. Der erste Blutropfen wird weggewischt. Die Vollblutprobe wird im Anschluss mit Hilfe eines Kapillarröhrchens in das Testfeld eingeführt, entnehmen Sie mit Hilfe der Kapillarröhrchen ca. 80 Mikrolitern des Vollblutes aus der Fingerbeere. Im Anschluss platzieren Sie die syphilis Blutprobe auf das vorhergesehene Testfeld.

Nachdem Sie die Blutprobe platziert haben, fügen Sie einen Tropfen (ca.40 Mikroliter) der Pufferlösung auf das Testfeld

ein. Bis zur Auswertung des Testes dauert es ca. 5min bis Ihnen das Testergebnis angezeigt wird.



---

## Wie erfolgt die Auswertung eines positiven Syphilis Schnelltestes?

Auf der Testkassette des Syphilis Schnelltestes erscheinen bei einem positiven Ergebnis zwei Kontrolllinien. Eine farbige Linie erscheint im Kontrolllinienbereich (C) und im Testlinien Bereich (T).

Bitte beachten Sie, dass Abhängig von der Konzentration der TP-Antikörper in der Probe die Farben der Testlinie (T) unterschiedlich stark ausfallen können. Jegliche Färbung im Testlinienbereich weisen auf ein positives Testergebnis hin.

---

## Wie hoch ist die Sensitivität des Schnelltestes Syphilis?

Die Sensitivität liegt bei 99,9% und die Genauigkeit bei 99,8%. Der Syphilis Cleartest ist für medizinisches Fachpersonal konzipiert und wird auf der Basis von Plasma, Vollblut oder Serum durchgeführt.



---

## Wann ist der Syphilis Schnelltest ungültig?

Wenn auf der Syphilis Testkassette weder eine Kontrolllinie oder Testlinie erscheint ist das Ergebnis als ungültig zu werten. Die wahrscheinlichsten Gründe für das Ausbleiben der Kontrolllinie sind unzureichendes Probenvolumen oder eine falsche Testdurchführung.

---

## Syphilis Schnelltest für Apotheken, Ärzte und medizinisches Fachpersonal

Der Cleartest Syphilis ist ein Schnelltest der ausschließlich von medizinischen Fachpersonal angewendet werden darf. Der Verkauf Lues Schnelltest erfolgt nicht an Privatkunden. Als Apotheke, Praxis oder Facharzt können Sie den Syphilis-Schnelltest kaufen.



Nur für medizinisches Fachpersonal

Schnellinfo



**BLUT**



**SERUM**



**PLASMA**



**NACH 5 MIN**

**Schwarz & Schwarz GmbH**  
Mühlweg 2b  
82054 Sauerlach  
Deutschland  
Telefon: +49 89 55898951  
Telefax:  
E-Mail: info@medicus-solutions.de

## DATENBLATT

### Syphilis Schnelltest

Art.-Nr.: C3 0610-05

Typ	PZN	REF	VE
Syphilis	00524134	C3 0610-05	5 Teste
Syphilis	00524140	C3 0610-10	10 Teste

**Schwarz & Schwarz GmbH**

Mühlweg 2b

82054 Sauerlach

Deutschland

Telefon: +49 89 55898951

Telefax:

E-Mail: info@medicus-solutions.de

Artikel	REF	Menge	Einzelpreis	Gesamtbetrag

zzgl. gesetzl. MwSt.

**Persönliche Angabe:**

Kundennummer: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Vorname: Nachname: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Straße, Hausnr.: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

**Hiermit bestelle ich verbindlich:**

Stempel / Adresse

\_\_\_\_\_  
Datum / Unterschrift

Sie bestellen zu unseren AGBs, unsere gültigen AGBs finden Sie unter <https://www.medicus-solutions.de/agb/>