

Meliseptol® Foam pure

Desinfektionsschaum – auch für empfindliche Flächen



- Schaum zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und kleinen Flächen
- sehr gute Materialverträglichkeit auch bei alkoholempfindlichen Materialien
- vollkommen aldehydfrei und frei von Alkylaminen
- parfümfrei
- dermatologisch getestet
- kurze Einwirkzeiten

Meliseptol® Foam pure – sanft und schnell



Meliseptol® Foam pure – auf einen Blick

- Schaum zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und kleinen Flächen
- gute Materialverträglichkeit auch bei alkoholempfindlichen Materialien wie z. B. Acrylglas, Ultraschallköpfe- und -sonden (inkl. Vaginalsonden), Pumpengehäuse (Valox), Untersuchungsliegen
- keine Aerosolbildung beim Versprühen
- parfümfrei – unauffälliger Geruch
- wirkt gegen Bakterien (inkl. TbB und MRSA) und Pilze, ist begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Rota-, Polyoma- und aviäre Influenzaviren
- DGHM/ VAH – gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste
- dermatologische Prüfung „sehr gut“
- als Tränkflüssigkeit mit den B. Braun Wipes einsetzbar

Hinweise zur Anwendung

Flächen vollständig mit Meliseptol® Foam pure benetzen und mit einem Tuch verreiben. Einwirkzeiten siehe Tabelle. Die Flächen dürfen nicht trockengerieben werden.

Kombination mit den B. Braun Wipes:

Meliseptol® Foam pure kann als Tränkflüssigkeit der B. Braun Wipes eingesetzt werden. Die Wirkstoffe werden sicher in ausreichender Menge an die zu desinfizierenden Flächen abgegeben und die Lösung kann über 4 Wochen im Spendersystem bleiben.

Wirkungsspektrum/Einwirkzeiten (EZ)

Einsatzgebiet	EZ
Flächendesinfektion zur Hospitalismusprophylaxe und in der allgemeinen Praxis (gem. DGHM/VAH)	1 Min. geringe Belastung 2 Min. hohe Belastung
begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)	1 Min.
Noroviren (MNV)	5 Min.
Rotaviren	1 Min.
Aviäre Influenzaviren	15 Sek.
Polyomaviren	5 Min.

Physikalisch-chemische Daten

Aussehen: klare, farblose Flüssigkeit
Geruch: unauffällig
pH-Wert: ca. 7
Dichte: ca. 0,98 g/ml
Flammpunkt: + 31 °C

Lieferform	Art.-Nr. (REF)	PZN
750 ml Schaumsprühflasche	19171	7314546
5 Liter-Kanister	19288	7314552

Meliseptol® Foam pure – Auszug aus den Produktinformationen

100 g Lösung enthalten: Propan-1-ol 17 g, Didecyldimethylammoniumchlorid 0,23 g, nicht-ionische Tenside. Angaben gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien: < 5 % nicht-ionische Tenside. Angaben gemäß Gefahrstoffverordnung: reizend. Gefahr ernster Augenschäden. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Augen-/Gesichtsschutz tragen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.